


GlassOuse v 1.4

Používateľská príručka



Upozornenie

- Držte okuliare GlassOuse mimo dosahu magnetov
- Okuliare GlassOuse je možné zložiť ako bežné okuliare
- Na odkladanie okuliarov GlassOuse používajte priložené púzdro
- Nabíjačku GlassOuse používajte iba so zariadením GlassOuse
- Pred prvým použitím nabite a nakalibrujte okuliare GlassOuse

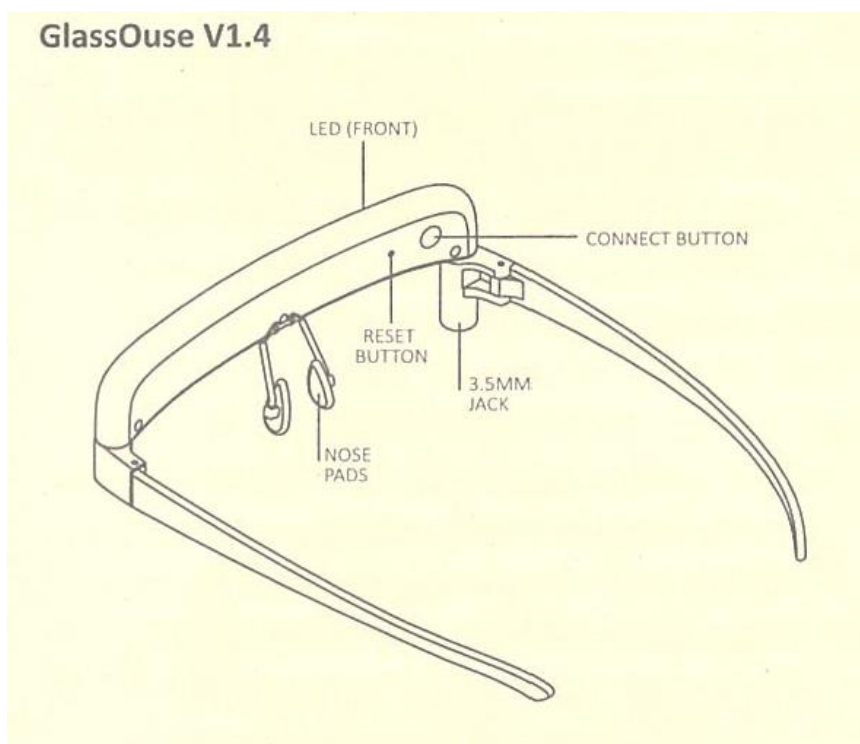

BLUE TOOTH PRIPOJENIE

- GlassOuse V1.4 podporuje pripojenie cez Bluetooth 4.0 a nižšie verzie
- Aktivujte si na svojom zariadení Bluetooth (na iOS a iPadOS si aktivujte aj Accessibility- Touch – Assistive Touch).
- Stlačte a držte tlačidlo "Connect". LED svetlo bude blikať.
- Nájdite a prepojte zariadenie „GlassOuse V1.4“ pomocou vyhľadávania a Bluetooth skenovania na Vašom zariadení
- Ak chcete používať okuliare GlassOuse s inými zariadeniami, znova stlačte tlačidlo „Connect“, na zrušenie pripojenia okuliarov GlassOuse na svojom aktuálne používanom zariadenia, alebo vypnite funkciu Bluetooth na aktuálne používanom zariadení.

POUŽITIE MYŠI

Okuliare GlassOuse V1.4 sa nosia ako bežné okuliare alebo na bežných okuliaroch. Keď je hlava v pohodlnej polohe smerom k monitoru, kurzor by mal byť v strede. Ak chce používateľ pohybovať kurzorom po obrazovke, musí pohybovať hlavou. Na klikania alebo podržanie na pozícií je potrebné použiť niektorý z externých spínačov.

Poznámka: Kurzor myši sa dá vrátiť späť do stredu tak, že ho posuniete hlavou k okraju obrazovky zariadenia a on sa vráti späť.

KALIBRÁCIA

Kalibráciu je odporúčané vykonať pred prvým použitím alebo po pripojení k novému zariadeniu. Ak sa kurzor pohybuje neštandardne (t. j. vibruje, kľže sa atď.), odporúča sa kalibrácia.

- Pripojte okuliare GlassOuse V1.4 k svojmu zariadeniu cez Bluetooth. Počkajte, kým LED dióda začne natrvalo svietiť na modro.
- Na spustenie automatickej kalibrácie držte okuliare GlassOuse v obrátenej polohe na rovnom pevnom povrchu.
- Počas kalibrácie si všimnete, že LED dióda bude blikať striedavo na červeno a na modro. Akonáhle bude LED opäť trvalo svietiť na modro, kalibrácia je dokončená.

Poznámka: Kalibráciu je potrebné vykonať do 3 minút od úspešného pripojenia k zariadeniu.

NASTAVENIE CITLIVOSTI MYŠI

Citlivosť myši GlassOuse V1.4 môžete nastaviť dvoma spôsobmi.

1. Ak chcete nastaviť rýchlosť kurzora na svojom zariadení (PC, tablet, telefón):
 - a. Prejdite na možnosti „Cursor Speed“ na zariadení.
 - b. Zvoľte požadovanú rýchlosť.
2. Nastavenie rýchlosť kurzora cez okuliare GlassOuse:
 - a. Pripojte okuliare GlassOuse ku G spínaču cez mono 3,5 mm jack konektor. Stlačte súčasne G spínač a tlačidlo „Reset“ (na stlačenie tlačidla reset použijete špendlík) na okuliaroch GlassOuse. Ak používate fúkací G spínač, stlačte tlačidlo „Reset“ na zariadení GlassOuse, počas fúkania do G spínača.
 - b. Pri stlačení najskôr uvoľníte tlačidlo „Reset“ a potom uvoľníte tlačidlo G spínača. LED by mala blikať na červeno. Ak používate spínač fúkania, najskôr uvoľníte tlačidlo „Reset“ a potom prestaňte fúkať do G spínača.
 - c. Zvoľte požadovanú rýchlosť pohybu kurzora (pomalá, stredná alebo rýchla) stlačením (alebo vtiahnutím vzduchu) u G spínača a to podľa rýchlosti blikania červeného LED svetla.
 1. LED pri nastavení „Pomalé“ bude blikať pomaly,
 2. LED pri nastavení „Stredné“ bude blikať rýchlejšie
 3. LED pri nastavení „Rýchlo“ bude blikať najrýchlejšie.
 - d. Podľa vášho výberu stlačte „Reset“ na potvrdenie citlivosti alebo nechajte zariadenie a po 30 sekundách si automaticky samo nastaví zvolenú citlivosť.

VOLITELNÉ G-SPÍNAČE

Ako voliteľné súčasti kompatibilné s okuliarmi GlassOuse V1.4 sú dodávané adaptívne spínače série G-Switch s 3,5 mm jack konektorom, ktorý je plne kompatibilný s konektorom na okuliaroch GlassOuse V1.4. Prípadne okuliare je možné použiť s funkciou „dwell click“, ktorá umožní ovládať zariadenie bez klikania iba nastavením sa na pozíciu a po určitom nastavenom čase dôjde k aktivácii (ako keby sme klikli). Všetky G spínače, sú špeciálne navrhnuté pre okuliare GlassOuse V1.4, ale ak máte iné adaptívne zariadenia využívajúce 3,5 mm konektor, tiež sa môžu pripojiť k okuliárom GlassOuse.

Možnosti externých spínačov:

- Spínač na zahryznutie: Klik je aktivovaný jemným zahryznutím do spínača
- Fúkací spínač: Klik je aktivovaný fúkaním
- Dotykový spínač: Klik je aktivovaný dotykom prsta alebo akejkoľvek časti tela
- Nožný spínač: klik je aktivovaný stlačením spínača chodidlom
- Tlakový spínač: Klik je aktivovaný stlačením povrchu spínača
- Vankúšový spínač: Klik je aktivovaný tlakom na povrch spínača hlavou alebo lícom
- Bezdotykový spínač: Klik je aktivovaný priložením prstov alebo akejkoľvek časti tela nad spínač
- Bez spínačov: GlassOuse V1.4 sa dajú použiť aj bez externých spínačov, cez softvér ktorý aktivuje klik po určitom časovom intervale.

- GlassOuse V1.4 sa dajú použiť aj s inými kompatibilnými spínačmi, ktoré sa pripájajú cez 3.5mm jack konektor.

GLASSOUSE V 1.4

- Rozmery: 160 mm x 145 mm x 50 mm; hmotnosť: 42.5 g
- LED indikátor
- Nabíjanie: Na zariadení nepretržite svieti LED na červeno
- Nabíjanie je dokončené: Na zariadení nesvieti LED
- Bluetooth hľadá spojenie: LED bliká na modro
- Pripojenie Bluetooth je aktívne: LED svieti nepretržite na modro
- Slabá batéria: LED bliká na červeno.

KOMPATIBILITA OS

- Počítač (Windows, Linux, MacOS, Chrome OS)
- Mobilné zariadenia (Android, iOS14, Windows, Chrome OS)
- SmartTV (Android)

BATÉRIA

Okuliare GlassOuse sa dodávajú s batériou CEBA 3.7V; 360mAh Li-Po. Batéria môže pracovať až 150 hodín na jedno nabitie. Keď zariadenie GlassOuse nepoužívate, nabíjate batériu aspoň raz za tri mesiace. Ak je zariadenie v kludovom režime viac ako 15 sekúnd, prepne sa do pohotovostného režimu a do pracovného režimu sa dá priviesť pohybom zariadenia a lebo stlačením ľubovoľného tlačidla.

SPOSOB POUŽITIA

Okuliare GlassOuse V1.4 je možné použiť v rozpätí 180° v horizontálnom alebo 160° vo vertikálnom smere. Nepoužívajte ich, keď úplne ležíte alebo sa pozeráte do zeme.

ZÁRUKA

GlassOuse v1.4 prichádza s 1-ročnou zárukou na chyby materiálu a spracovania.